


HANDLEIDING

TV Streamer 2

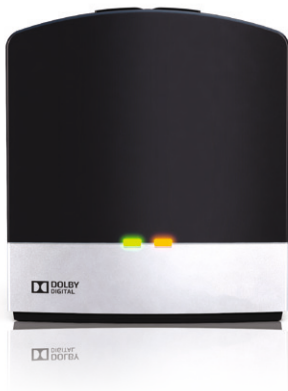

Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van de TV Streamer 2.

Met de TV Streamer 2 ontvangt u gestreamde audio van hoge kwaliteit van uw televisie, stereo, computer of een vergelijkbaar apparaat, rechtstreeks in uw hoortoestellen.

Lees deze handleiding aandachtig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van de TV Streamer 2. Raadpleeg uw hoorspecialist bij overige vragen.

Lees voor uw veiligheid aandachtig het hoofdstuk 'Belangrijke informatie' op pagina 27- 29 door.

Model: SAS-3

FCC ID: X26SAS-3

Verklaring:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ISED-regels.

Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

1. Dit apparaat mag geen storende interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief storing die leidt tot ongewenste werking van het apparaat.

LET OP: dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan Klasse B digitale apparatuur worden gesteld, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels en ISED-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat functioneert in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook uitstralen. Als de installatie en het gebruik van het apparaat niet volgens de instructies worden uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een individuele installatie. Als dit apparaat storende interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen te bepalen is door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren met een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de ontvanger en het apparaat vergroten.
- Dit apparaat op een ander voedingscircuit aansluiten dan de ontvanger.
- De verkoper of een ervaren radio-/televisiemonteur raadplegen.

Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

Gebruiksbestemming

De TV Streamer 2 is bedoeld voor gebruikers van draadloze hoortoestellen. Ze kunnen hiermee beter televisie- of andere audioprogramma's volgen. De TV Streamer 2 zendt geluid van de televisie of een ander audio-apparaat naar de draadloze hoortoestellen.

Deze producten zijn in overeenstemming met de volgende standaard reglementen:

In de EU: Het toestel voldoet aan de Essentiële vereisten volgens Annex 1 van de Richtlijn 93/42/EEC voor medische apparatuur (MDD).

Hierbij verklaart GN Hearing A/S dat de radioapparatuurtype(n) SAS-3 voldoet/voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is in te zien op het volgende internetadres: declarations.resound.com

In de VS: FCC CFR 47 Deel 15, subonderdeel C.

In Canada: deze hoortoestellen zijn gecertificeerd onder de regels van ISSED.

In landen buiten de EU en de VS gelden andere internationale reglementaire vereisten. Zie voor desbetreffende gebieden de nationaal geldende vereisten.


Voldoet aan Japanse radiowetgeving en Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving. Dit toestel is goedgekeurd conform de Japanse radiowetgeving (電波法) en de Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving (電気通信事業法). Dit toestel mag niet gemodificeerd worden (anders wordt het toegekende bestemmingsnummer ongeldig).

Inhoud


Beschrijving	8
Van start met uw TV Streamer 2.	10
Koppelen aan uw hoortoestellen.	18
Streaming starten en stoppen.	21
Bediening	24
Instelbare vertragingmodus.	26
Belangrijke Informatie	23
Technische specificaties	30
Garantie	30
Oplossen van problemen	32

Beschrijving

- 1 Micro-USB-ingang voor oplader
- 2 Koppelknop
- 3 Schakelaar voor mono/stereo
- 4 Analoge mini-jack audio-ingang
- 5 Optische (Toslink) audio-ingang
- 6 Coaxiale audio-ingang

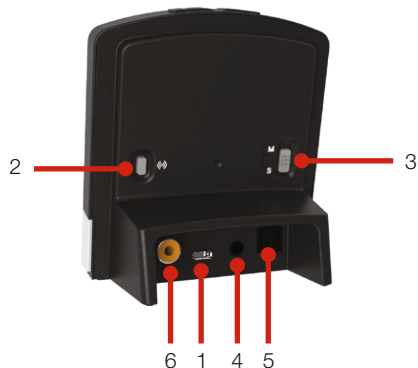

- 7 Volume omhoog
- 8 Volume omlaag
- 9 Voedingslampje (groen)
- 10 Indicatielampje (geel)
- 11 Oplader met wandstekker
- 12 Mini-USB-aansluiting

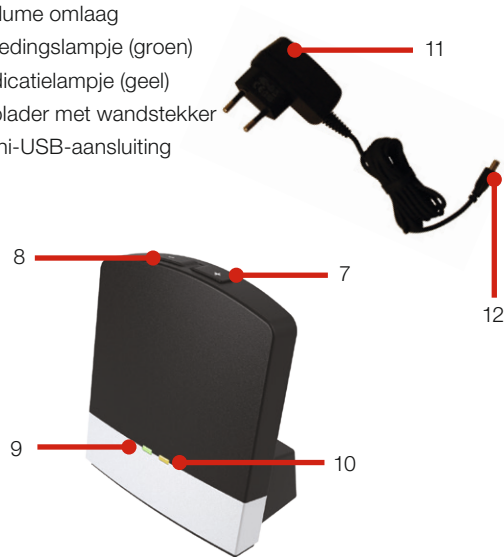

Van start met uw TV Streamer 2

De TV Streamer 2 installeren

De installatie van de TV Streamer 2 is afhankelijk van de instellingen van uw televisie, geluidssysteem, computer en andere audio-apparaten. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden. De volgende stappen leiden u door de eenvoudige koppelprocedure, door vrijwel iedereen gemakkelijk uit te voeren. Start met het aansluiten van de kabels tussen de TV Streamer 2 en de audiobron en koppel als laatste de TV Streamer 2 met uw hoortoestellen.



De TV Streamer 2 ondersteunt zowel analoge als digitale audio-invoer. Lees de volgende paragrafen voor informatie over ondersteunende audio-indelingen en hoe u de TV Streamer 2 kunt aansluiten op audioapparaten.

De TV Streamer 2 aansluiten op een analoog audioapparaat (zoals een TV of een stereoinstallatie).


1. Steek de stekker van de voeding in het stopcontact en steek de andere kant in de micro USB-ingang op de Unite TV 2.
2. Steek de stereo mini-jack van de audiokabel in de mini-jack ingang op de TV Streamer 2 (4 op pagina 8).
3. Steek het andere twee stekkertjes van de audiokabel in 'AUDIO OUT' -uitgangen op het audioapparaat).

4. AUDIO OUT is meestal gemarkeerd met 'L' en 'R' voor links en rechts. U vindt ze aan de achterkant van het audio-apparaat



Let op: met deze aansluiting verzenden de meeste audioapparaten gelijktijdig geluid naar zowel uw hoortoestellen als naar de luidsprekers die zijn aangesloten op het audioapparaat.

Op sommige audioapparaten kunt u de balans tussen AUDIO OUT en de luidsprekers aanpassen. Raadpleeg de handleiding van uw audioapparaat voor meer informatie.

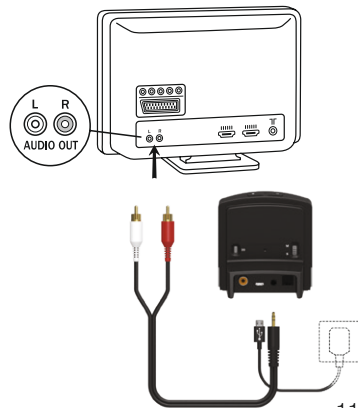

Alternatieve installatie analoge audiokabels

Als het niet mogelijk is om de TV Streamer 2 aan te sluiten op AUDIO OUT met behulp van de rode en witte pluggen, probeer dan één van de volgende alternatieven:


Mini-jack adapter:

1. Steek de voeding in het stopcontact en steek de kabel in de micro USB-ingang op de TV Streamer 2
2. Steek de stereo mini-jack op de audiokabel in de stereo mini-jack-ingang op de TV Streamer 2 (4 op pagina 8)
3. Sluit de adapter van de mini-jack van de stereo aan op de rode en witte pluggen aan het andere uiteinde van de audiokabel
4. Steek de adapter van de mini-jack in de uitgang 'Hoofdtelefoon' op de televisie, of steek hem in de audiouitgang op uw computer.



Let op: de uitgang 'Hoofdtelefoon' bevindt zich meestal op de zij- of voorkant van het audioapparaat. Als u deze uitgang gebruikt, hoort alleen degene die het hoortoestel draagt het geluid en worden de luidsprekers van het audioapparaat op stil gezet.


Als u de luidsprekers niet op stil wilt zetten, zie dan de eerste installatie of de installatie op de volgende pagina. Uw audioapparaat kan wellicht tegelijkertijd de luidsprekers en hoofdtelefoon ondersteunen. Instructies hiervoor vindt u in de handleiding van het apparaat.

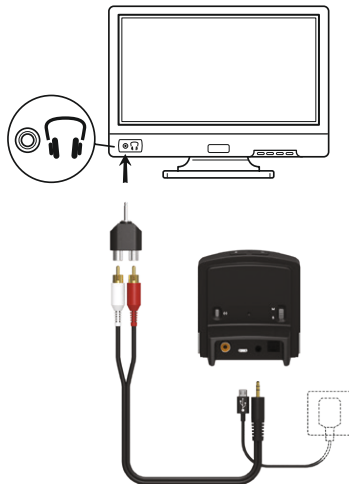

Scartadapter:

1. Steek de voeding in het stopcontact en steek de kabel in de micro USB-ingang op de TV Streamer 2
2. Steek de stereo mini-jack van de audiokabel in de stereo mini-jack-ingang op de TV Streamer 2 (4 op pagina 8)
3. Sluit de scartadapter van de stereo aan op de rode en witte pluggen en op het andere uiteinde van de audiokabel.
4. Steek de scartadapter in de scartaansluiting op het audio-apparaat.

i Let op: de scartuitgang zit meestal aan de voor- of zijkant van het audioapparaat. Zie de handleiding van uw audioapparaat als extra configuratie van de scartuitgang nodig is.

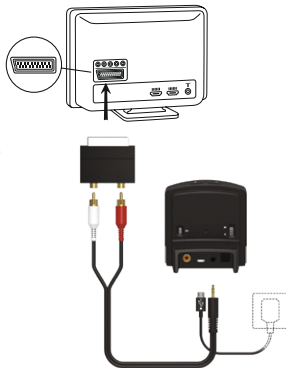

De TV Streamer 2 op een digitaal audioapparaat aansluiten (zoals een tv of een stereoinstallatie)

i De TV Streamer 2 ondersteunt zowel analoge als digitale audio-invoer. Voor digitale invoer worden de volgende indelingen ondersteund:

Stereo PCM

- Sample rate: tot 192 kHz
- Sample resolution: tot 32 bit

Dolby Digital

- Kanalen: max 5.1
- Bitrate: 32 kbs tot 640 kbs
- Sample rate: 32, 44,1 en 48 kHz


Let op: Dolby Digital Plus (nodig voor een HDMI-interface), Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic, Dolby Digital EX, Dolby Digital Surround EX, en AAC (Advanced Audio Codec) worden niet ondersteund.

De optische (Toslink) audio-invoer gebruiken.

1. Steek de voeding in het stopcontact en steek de kabel in de micro USB-ingang op de TV Streamer 2.
2. Steek een van de pluggen van de optische audiokabel in de optische audio-ingang (5 op pagina 8) op de TV Streamer 2.


Let op: de meeste optische kabels worden geleverd met een kleine beschermkap over de bovenkant van de kabel. Verwijder deze beschermkap voordat u de kabel gebruikt.

3. Steek het andere uiteinde van de optische audiokabel in de 'Digital Audio Out/Optical'-aansluiting op uw audioapparaat.

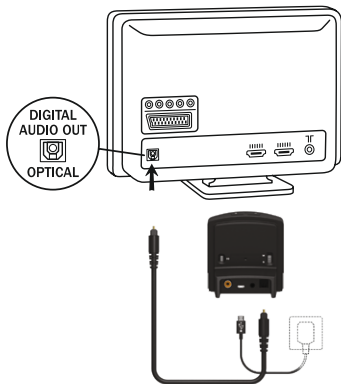

De coaxiale audio-invoer gebruiken.

1. Steek de voeding in het stopcontact en steek de kabel in de micro USB-ingang op de TV Streamer 2.
2. Steek de ene plug van de coaxiale audiokabel in de coaxiale plug (6 op pagina 8) op TV Streamer 2.
3. Steek de andere plug van de coaxiale audiokabel in de 'Digital Audio Out/Coaxial'-aansluiting op uw audioapparaat.

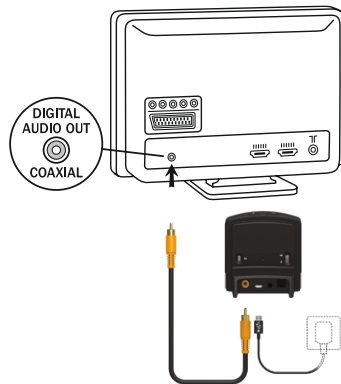

Koppelen met uw hoortoestellen



Let op: de volgende informatie is bedoeld voor de hoorspecialist die uw TV Streamer voor u koppelt met uw hoortoestellen. De handelingen zijn echter eenvoudig en u kunt ze ook zelf uitvoeren.

U kunt maximaal 3 compatibele streamers koppelen met uw hoortoestellen. (Bijvoorbeeld een Micro Mic en twee TV-streamers). Daarvoor moet kanaal 1, 2 of 3 worden gekozen bij de start van de koppelprocedure.

De Unite TV 2 in kanaal 1 koppelen

1. Zorg dat uw TV Streamer is ingeschakeld en of het groene lampje op de voorkant (9 op pagina 9) brandt. Uw hoortoestellen moeten zijn uitgeschakeld: open de batterijlades.
2. Druk één keer op de koppelknop op de TV Streamer 2 (2 op pagina 8). Het indicatielampje knippert nu om de 2 seconden geel: de TV Streamer is nu klaar voor koppeling in kanaal 1. De TV Streamer 2 blijft gedurende 20 seconden in de koppelmodus staan.
3. Nu de koppelmodus is geactiveerd, schakelt u de hoortoestellen in door beide batterijlades te sluiten. Bij een succesvolle koppeling hoort u een melodie in beide hoortoestellen. De TV Streamer is nu klaar voor gebruik!

De TV Streamer 2 in kanaal 2 koppelen

1. Druk de koppelknop twee keer in. Het gele indicatielampje op de voorkant knippert nu om de 2 seconden twee keer. De TV Streamer is nu klaar voor koppeling in kanaal 2.
2. Sluit in de koppelmodus de batterijlades van de hoortoestellen.

De TV Streamer 2 in kanaal 3 koppelen

1. Druk de koppelknop drie keer in. Het gele indicatielampje knippert nu om de 2 seconden drie keer. De TV Streamer is nu klaar voor koppeling in kanaal 3. Sluit de batterijlades van de hoortoestellen.
2. Sluit in de koppelmodus de batterijlades van de hoortoestellen.

Knipperpatroon tijdens koppelen:

Aantal keren drukken op koppelknop	Indicatielampje	Kanaal
1	① ① ① ①	1
2	① ② ① ② ① ② ① ②	2
3	① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③	3

Streaming starten en stoppen

Schakel televisie, geluidssysteem, computer of ander audioapparaat dat is aangesloten op de TV Streamer 2 aan. Controleer of uw hoortoestel ook is ingeschakeld. U kunt het streamen op twee manieren starten.

1. Houd de programmaknop of schuifknop op beide hoortoestellen ongeveer 3 seconden ingedrukt om een gestreamd geluidssignaal te horen. Als het ear-to-ear-synchronisatie geactiveerd in uw hoortoestellen, hoeft u de streaming op slechts één van de hoortoestellen in te schakelen. Zodra de TV Streamer 2 verbinding heeft, hoort u een melodietje in uw hoortoestellen, gevolgd door het gestreamde geluid.
2. Als u een afstandsbediening (optioneel) heeft hoeft u slechts op de streamingknop hiervan te drukken. Zodra de hoortoestellen verbinding hebben met de TV Streamer 2, hoort u een korte melodie in beide hoortoestellen, gevolgd door het gestreamde geluid. Er verschijnt een 'streaming'-symbool op het display.

Streamen op een 2e of 3e TV Streamer 2

Als er meer dan één TV Streamer 2 beschikbaar is, kunt u twee of drie keer op de knop op de Afstandsbediening drukken, afhankelijk van welk TV Streamer 2 apparaat u wilt beluisteren.



Maximaal drie streamingapparaten worden aangeduid met de letter A, B of C en een naam die door de hoorspecialist is toegekend. Het apparaat dat in gebruik is, ziet u op het display van de afstandsbediening.

Als u geen afstandbediening heeft, houd dan de knop op het hoortoestel een tweede of derde keer ongeveer drie seconden ingedrukt om de 2e of 3e TV Streamer 2 te gebruiken.

Streamen uitschakelen

Druk een keer op de programmaknop van één van de hoortoestellen. Dit stopt het streamen naar uw hoortoestel, het apparaat keert terug naar het laatst gebruikte programma.

Let op: hebben uw hoortoestellen Ear-to-ear-synchronisatie, dan keren beide hoortoestellen terug naar het laatst gebruikte programma.

Met een compatibele afstandsbediening (optioneel), hoeft u alleen maar op de knop 'P' midden op het toetsenbord te drukken*. Of druk op de knop 'Home' om naar uw basisinstellingen terug te keren.

Streaming met TV Streamer 2 wordt tijdelijk uitgeschakeld als u telefoneert met de Telefoonclip+ of met AutoPhone. Als u uw telefoongesprek beëindigt, wordt het streamen weer hervat.



Let op: het kan zijn dat u buiten bereik (>7m) van uw TV Streamer 2 komt. Als u binnen 5 minuten weer binnen het bereik komt, maken uw hoortoestellen automatisch opnieuw contact en wordt het streamen hervat.

Bediening

Het volume aanpassen

De Unite TV 2 biedt vanaf het moment dat hij wordt aangezet een comfortabel luisterniveau. Voor sommige apparaten of luisteromgevingen is het soms wenselijk om het volume aan te passen.

Houd er rekening mee dat de volumewijzigingen op de Unite TV 2 meestal alleen gelden voor het geluid van het aangesloten apparaat en niet voor de normale omgevingsgeluiden.

Gebruik de '+' en '-' toets (7 en 8 op blz. 9) om het volume naar uw wens in te stellen. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen al op een comfortabel niveau zijn ingesteld voordat u het volume verandert. Meestal hoeft deze afstelling maar één keer te gebeuren. De TV Streamer 2 slaat het nieuwst ingestelde volumeniveau op.

Gebruik de Afstandsbediening 2 (optioneel) om het streaming-volume en het volume van de microfoon in het hoortoestel* te regelen. Vraag uw hoorspecialist om meer informatie over deze accessoire.

** Volume-aanpassingen van zowel de hoortoestellen als de streaming is alleen mogelijk met de Afstandsbediening 2.*

Het volume kan soms nog verder aangepast worden bij de signaalbron zelf, bijvoorbeeld door het volume van de TV zachter te zetten. Dit beïnvloedt dikwijls het volume van het geluid dat

draadloos naar de hoortoestellen wordt gezonden. Dit beïnvloedt dikwijls het volume van het geluid dat draadloos naar de hoortoestellen wordt gezonden. Als u het volume van de televisie aanpast, is dit ook van invloed op het volume in de kamer.

Mono-/stereobediening

Met de mono-/stereoschakelaar (3 op pagina 8) kunt u de audio-streaming instellen op stereo (twee kanalen) of mono (één kanaal). Bij binaurale aanpassingen moet de schakelaar op stereo staan. Voor monaurale aanpassingen moet hij op mono staan.

Instelbare vertragsingsmodus

Soms kan er een verkeerde afstemming ontstaan tussen de gestreamde audio naar de hoortoestellen en het geluid van de televisiespeakers (echo) of zelfs een verkeerde afstemming tussen de gestreamde audio en het beeld op de televisie (lipsynchronisatie).

Dit is duidelijker hoorbaar in meer complexe systemen waarbij de TV Streamer 2 niet direct is aangesloten op de televisie (bijv. bij digitale televisie via settop-box of satelliet).

Om verkeerde afstemmingen te voorkomen past u de streamings-vertraging van de TV Streamer 2 als volgt aan:

1. Controleer of de TV Streamer 2 ingeschakeld is en of uw hoortoestellen de gestreamde audio ontvangen.
2. Houd de koppelknop (2 op pagina 8) 3 seconden lang ingedrukt. Nu opent de TV Streamer 2 de instelbare vertragsingsmodus, waarbij het groene lampje op de voorkant van de TV Streamer 2 iedere twee seconden knippert. Het gele lampje gaat branden als er een audiosignaal is.
3. Gebruik de knoppen '+' en '-' (7 en 8 op pagina 9) bovenop de TV Streamer 2 om de vertraging in het gestreamde signaal te verhogen of te verlagen in stappen van 10 ms. Het gestreamde signaal kan vertraagd worden binnen het bereik van 0-250 ms.

4. Als er een optimale uitlijning tussen de gestreamde audio naar de hoortoestellen en het geluid van de televisiespeakers is bereikt, of de uitlijning tussen het gestreamde geluid en het beeld op de televisie bereikt is, houd de koppelknop dan 3 seconden ingedrukt. Nu hervat de TV Streamer 2 zijn normale werking, aangegeven door het groene lampje dat voortdurend brandt.

De offset-instelling in de instelbare vertragsingsmodus wordt opgeslagen in de TV Streamer 2.

Als u de instelbare vertragsingsmodus niet afsluit door de koppelknop 3 seconden ingedrukt te houden, hervat de TV Streamer 2 automatisch de normale werking na 30 minuten.

Om de vertraging te herstellen naar 0 ms (fabrieksinstelling), houdt u de koppelknop ingedrukt en zet u tegelijkertijd de TV Streamer 2 aan.

Belangrijke informatie



Onderhoud en zorg

Reinig de TV Streamer 2 met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsproducten (wasmiddel, zeep, etc.) of alcohol om het apparaat te reinigen.

Als u de TV Streamer 2 een langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.



Algemene waarschuwingen

Houd de TV Streamer 2 buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

De TV Streamer 2 gebruikt digitaal gecodeerde overdracht met laag vermogen om met andere draadloze apparaten te communiceren. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat elektronische apparaten in de nabije omgeving beïnvloed worden. Breng de TV Streamer 2 in dit geval buiten bereik van het betreffende apparaat.

Gebruik de TV Streamer 2 alleen met bijgeleverde voeding. Gebruik van een andere voeding kan het apparaat beschadigen of kapot maken en dat kan gevaarlijk zijn. Gebruik van andere voedingsmiddelen kan alle rechten op garantie beëindigen.

- Als u de stroomkabel uit het stopcontact haalt, trek dan altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.
- Gebruik nooit een beschadigd snoer.
- Probeer de voeding nooit uit elkaar te halen omdat u dan een gevaarlijke elektrische schok kunt krijgen.
- Gebruik de voedingskabels niet buiten of in vochtige ruimtes.

Wanneer u tijdens gebruik van de TV Streamer 2 last heeft van elektromagnetische storing, verwijder u dan van de storingsbron.



Algemene voorzorgsmaatregelen

- Uw hoortoestel en de TV Streamer 2 hebben tijdens de aanpassing een unieke netwerkcode meegekregen. Dit zorgt ervoor dat de TV Streamer 2 geen hoortoestellen van anderen kan beïnvloeden.
- Hoogspanningsapparatuur, grote elektronische installaties en metalen constructies kunnen mogelijk het signaal aantasten en de reikwijdte aanzienlijk verminderen.
- Gebruik alleen originele accessoires.
- Breng geen veranderingen of modificaties aan op de TV Streamer 2.
- Het openen van de TV Streamer 2 kan hem beschadigen. Als zich problemen voordoen die u niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw hoorspecialist.
- De TV Streamer 2 mag alleen gerepareerd worden door een geautoriseerd servicecenter.
- Gebruik de TV Streamer 2 niet in ruimtes waar RF-overdracht verboden is, zoals in vliegtuigen.
- Koppel de TV Streamer 2 alleen met apparaten waar hij expliciet voor bedoeld is.

Technische specificaties

Operationeel bereik:	tot 7 meter
Voeding:	externe adapter
Draadloos:	2.4 GHz
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 55 °C
Opslagtemperatuur:	-20 tot 60 °C

Temperatuurtest, transport en opslaginformatie

Dit product is onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten in verwarmingscycli tussen -25 ° C en 70 ° C conform interne- en industriestandaarden.

Garantie

De TV Streamer 2 heeft een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden vanaf de dag van aankoop. Houd er rekening mee dat er in uw land mogelijk andere garanties gelden. Neem contact op met uw hoorspecialist voor meer informatie.

Wat dekt deze garantie?

Een elektrisch apparaat dat door montage-, fabricage-, of ontwerpfouten, bij normaal gebruik gedurende de looptijd van de

fabrieksgarantie, niet naar behoren functioneert, wordt kosteloos vervangen of gerepareerd. U dient de TV Streamer 2 hiervoor terug te brengen naar het verkooppunt.

Als blijkt dat een reparatie niet haalbaar is, kan het gehele apparaat vervangen worden door een vergelijkbaar apparaat. Uiteraard na wederzijds akkoord van u en uw hoorspecialist.

Wat is niet gedekt door de garantie?

Problemen ten gevolge van onjuiste behandeling of onderhoud, overmatig gebruik, ongevallen, reparaties uitgevoerd door een onbevoegde partij, blootstelling aan corrosieve omstandigheden of schade ten gevolg van vreemde voorwerpen in het apparaat zijn NIET gedekt door de beperkte garantie en maken de garantie mogelijk zelfs ongeldig. Bovenstaande garantie heeft geen invloed op alle juridische rechten die u zou kunnen hebben onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentenproducten. Uw hoorspecialist heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder gaat dan onze bepalingen. Neem hierover contact op met uw hoorspecialist.

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het indrukken van de streamingknop op de afstandsbediening heeft geen effect</i>	De TV Streamer 2 en hoortoestellen zijn niet gekoppeld De afstandsbediening en de hoortoestellen zijn buiten elkaars draadloos bereik	Voer de koppelprocedure uit Verzekert u ervan dat de afstandsbediening en de hoortoestellen binnen elkaars draadloos bereik zijn, en activeer de streamer opnieuw
<i>De programmaknop op het hoortoestel is langer dan 3 seconden ingedrukt, zonder resultaat</i>	De TV Streamer 2 en de hoortoestellen zijn niet gekoppeld	Voer de koppelprocedure uit
<i>De koppelknop op de TV Streamer 2 is ingedrukt, maar er klinkt geen melodie in het hoortoestel</i>	De TV Streamer 2 en de hoortoestellen zijn buiten hun draadloos bereik De TV Streamer 2 en hoortoestellen staan niet gelijktijdig in koppelmodus	Verzekert u ervan dat de TV Streamer 2 en de hoortoestellen zich binnen elkaars draadloos bereik bevinden en herhaal de koppelprocedure Herhaal de koppelprocedure en verzekert u ervan dat de batterijlades van beide hoortoestellen gesloten worden binnen 30 seconden nadat de koppelknop op de TV Streamer 2 ingedrukt is

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>De streamingknop op de Afstandsbediening is ingedrukt, maar er wordt geen signaal gevonden (er verschijnt een 'X' op het display)</i>	De TV Streamer 2 en de hoortoestellen zijn buiten elkaars draadloos bereik De kabel van de TV Streamer 2 zit niet correct in de televisie De TV Streamer 2 is uitgeschakeld of het geluid van de televisie staat op stil	Verzekert u ervan dat de TV Streamer 2 en de hoortoestellen binnen elkaars draadloos bereik zijn en activeer het streamen opnieuw Sluit de kabel correct aan op de TV Streamer 2 en de televisie en activeer het streamen opnieuw Zet de TV Streamer 2 opnieuw aan of zet het geluid aan en activeer het streamen opnieuw
<i>Er is geen geluid in de hoortoestellen, maar de audiostreaming is wel actief</i>	De TV Streamer 2 en de hoortoestellen zijn buiten elkaars draadloos bereik De televisie is uitgeschakeld of het geluid staat op stil	Controleer of de TV Streamer 2 en de hoortoestellen zich binnen hun draadloos bereik bevinden Zet de televisie of het geluid weer aan
<i>Het geluid van de TV Streamer 2 is vervormd</i>	Het volume van de TV staat te hard	Pas het volume aan met de toets op de TV Streamer 2 tot het geluid niet meer vervormt

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het volume van de TV Streamer 2 is heel zacht</i>	Het volume van de TV staat te zacht	Pas het volume aan met de toets '+' en '-' op de TV Streamer 2 tot het geluid goed hoorbaar is
<i>Het geluid van de TV Streamer 2 is vervormd of het valt van regelmatig uit</i>	De TV Streamer 2 en de hoortoestellen bevinden zich op de grens van elkaars draadloos bereik	Ga een beetje dichterbij de TV Streamer 2 zitten
	De TV Streamer 2 Unite TV 2 en de hoortoestellen zijn niet voldoende binnen het 'gezichtsveld'	Zorg dat de TV Streamer 2 zich op een juiste positie bevindt en dat er geen obstakels in het zichtveld van de streaming staan
<i>Het geluid van de TV Streamer 2 loopt niet synchroon met het beeld op de televisie</i>	Uw televisie is niet in staat het geluid van de gekozen audio uitgangen te synchroniseren met het beeld	Probeer een andere audio-ingang op uw televisie. Is die er niet, volg dan de instructies in de paragraaf 'Afstelbare vertragingmodus' van deze handleiding. Als dit niet helpt, neem dan contact op met uw televisiedeleverancier
		De audiostreaming van de TV Streamer 2 heeft bijna geen latentie en kan synchronisatiefouten niet aanpassen

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het geluid van de TV Streamer 2 loopt niet synchroon met het geluid uit de televisiespeakers</i>	Uw televisie is niet in staat het geluid van de gekozen audio uitgangen te synchroniseren met het geluid van uw televisiespeakers	Probeer een andere audio-ingang op uw televisie. Is die er niet, volg dan de instructies in de paragraaf 'Afstelbare vertragsmodus' van deze handleiding. Als dit niet helpt, neem dan contact op met uw televisiedelealer De audiostreaming van de TV Streamer 2 heeft bijna geen latentie en kan echo-effecten niet aanpassen
<i>Het geluid van het hoortoestel is te hoog of te laag</i>	Het audio inputniveau is niet geschikt om naar te luisteren	Pas het volume aan met de toets '+' en '-' op de TV Streamer 2 tot het geluid goed hoorbaar is U kunt als alternatief ook de toetsen '+' en '-' op de afstandsbediening (optioneel) gebruiken
<i>De streaming naar een hoortoestel valt onverwacht weg</i>	De TV Streamer 2 en de hoortoestellen zijn meer dan 5 minuten buiten elkaars draadloze bereik geweest De batterijspanning in het hoortoestel kan dusdanig laag zijn dat het de digitale streaming niet meer ondersteunt	Verzekert u ervan dat de TV Streamer 2 en de hoortoestellen binnen elkaars draadloos bereik zijn, en activeer de streamer opnieuw Vervang de batterij in het hoortoestel

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Lees informatie met een waarschuwingssymbool zorgvuldig door.



WAARSCHUWING wijst op een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen.

VOORZORGSMAATREGEL wijst op een situatie die kan leiden tot lichte verwondingen.



Advies en tips over hoe beter om te gaan met uw draadloze accessoire.



Apparatuur maakt gebruik van RF-overdracht.

Nominale verzonden RF-uitgangsvermogen is 16.3 dBm.



Dit product valt onder Type B contactonderdelen.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.



Vraag uw hoorspecialist naar de juiste wegwerpmethode van het accessoire

Geproduceerd conform
EU Medische richtlijn 93/42/EEG:

Internationaal Hoofdkantoor

GN Hearing A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Denemarken

Tel.: +45 4575 1111

CVR-nr. 55082715



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische apparaten
93/42/EEG, of EU Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU dienen
gericht te worden aan GN Hearing A/S.