

Snelgids connectiviteit en de Interton Sound app



Inhoud

Compatibiliteit: Hoortoestellen en mobiele apparaten	4
---	----------

Van start met uw iPhone,

iPad of iPod touch	6
---------------------------------	----------

Koppelen met uw Interton hoortoestellen..	6
---	---

Geluid streamen	10
-----------------------	----

Audiopad	12
----------------	----

Bediening van uw hoortoestellen via native app in uw iPhone, iPad of iPod (3 keer klikken)	15
--	----

De Interton Sound app.....	19
-----------------------------------	-----------

Downloaden en koppelen met uw Apple of Android-apparaat	19
---	----

Overzicht Interton Sound app	22
------------------------------------	----

Startscherm

Programmawijziging en volumeregeling..	24
--	----

Sneltoetsen	27
-------------------	----

Sound Enhancer	28
----------------------	----

Tinnitus Manager	32
------------------------	----

Favorieten	34
------------------	----

Status

Verbinding en batterijstatus	34
------------------------------------	----

Mijn Interton

Handige tips	36
--------------------	----

Lees meer over de app	37
-----------------------------	----

Mijn hoortoestel zoeken	38
-------------------------------	----

Meer

Extra app-opties	39
------------------------	----

Stream geluid naar uw

Android-telefoon	40
-------------------------------	-----------

Interton EasyHearing app	43
---------------------------------------	-----------

Compatibele Interton hoortoestellen

Hieronder vindt u een lijst van Interton draadloze hoortoestellen die geschikt zijn voor de Interton Sound app. Twijfelt u of uw hoortoestel geschikt is, neem dan contact op met uw hoorspecialist.

Interton Ready



Compatibele mobiele apparaten

Apple: Interton hoortoestellen die de Made for Apple (MFi) functionaliteit ondersteunen zijn compatibel met iPhone 5 en hoger, iPad Pro, iPad Air en hoger, iPad (4e generatie) en hoger, iPod touch (5e generatie) met iOS 8.0 en hoger.

Installeer altijd de laatste iOS versie voor de beste prestaties.

Android: De Interton Sound app ondersteunt een aantal van de populairste Android-toestellen.

We maken steeds meer mobiele apparaten geschikt voor de Interton-app. Raadpleeg voor de meest recente updates: **www.Interton.com/compatibility**

Koppelen met uw iPhone, iPad of iPod touch

Zo koppelt u uw Interton hoortoestellen met uw iPhone, iPad of iPod touch.
Het koppelingsproces is afhankelijk van het model hoortoestel.

Controleer de batterij

Plaats een nieuwe batterij in uw Interton hoortoestel. Sluit de batterijlade nog niet, zodat het hoortoestel nog niet inschakelt.






Schakel Bluetooth in





Veeg van beneden naar boven op het scherm om in het bedieningsscherm te komen.

Tik op het Bluetooth-icoon.

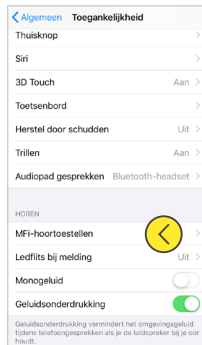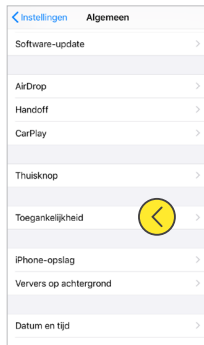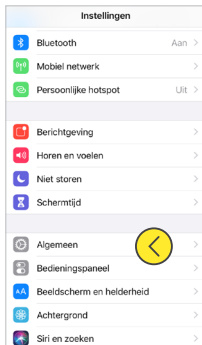

Hoortoestellen detecteren
Nu Bluetooth is geactiveerd, gaat u naar **Instellingen> Algemeen>Toegankelijkheid**.

Sluit de batterijlade om uw hoortoestel in te schakelen, zodat uw iPhone, iPad of iPod touch het kan detecteren. Tik nu op **MFi Hoortoestellen**.

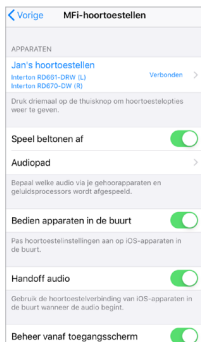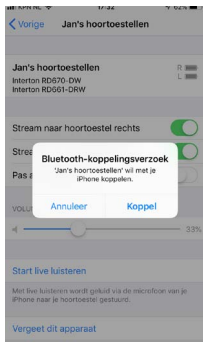

Verbinding maken

Tik op de naam en het modelnummer van uw hoortoestel op het scherm.

Druk op Koppel in het dialoogvenster. Als u twee hoortoestellen koppelt, ontvangt u ook twee koppelingsverzoeken.

Het tweede verzoek verschijnt een paar seconden na het starten van de eerste koppeling.

Als het toestel verbonden is, wijzigt de hoortoestelnaam naar blauw en staat er rechts 'Verbonden'.

Met het pijltje rechts kunt u naar de extra functionaliteiten van uw hoortoestellen.

Uw hoortoestellen opnieuw verbinden met uw iPhone, iPad of iPod touch

Als u uw hoortoestellen of Apple-apparaat uitschakelt, wordt de verbinding verbroken. Om ze opnieuw te verbinden schakelt u de hoortoestellen in door de batterijlades te openen en sluiten. De hoortoestellen maken automatisch verbinding met uw Apple-apparaat. U kunt de verbinding ook controleren via de snelkoppeling Toegankelijkheid (3x op de homeknop drukken) om er zeker van te zijn dat uw hoortoestellen gedetecteerd zijn.

Koppelen met meer dan één Apple-apparaat
U kunt uw Beltone hoortoestellen aan maximaal 5 verschillende Apple-apparaten koppelen, maar u kunt er slechts met één tegelijkertijd verbinding maken.

Om een ander Apple-apparaat te verbinden, veegt u van beneden naar boven op het scherm van het Apple-apparaat waarmee u al verbinding heeft en tikt u op het Bluetooth-icoon om Bluetooth uit te schakelen.

Nu kunt u Bluetooth inschakelen op het apparaat waarmee u wilt verbinden.

Wacht op verificatie

Als u op Koppel tikt volgt er eerst een verificatieproces. Doet uw klant het hoortoestel in, dan moet hij wachten op 6 toontjes, gevolgd door een melodie. Draagt hij de toestellen niet, wacht dan minstens 2 minuten.

Stream geen audio voordat de verificatie is voltooid.

Stream geluid direct naar uw Interton hoortoestellen

U kunt audio, zoals muziek, rechtstreeks in stereo vanaf uw Apple-apparaat naar uw hoortoestellen streamen.

Bedieningsschermb



Wanneer uw hoortoestellen zijn gekoppeld met het Apple-apparaat, wordt de audio automatisch naar uw hoortoestellen gestreamd.

Om terug te keren naar normaal telefoongebruik drukt u lang op het streaming-pictogram in de rechterbovenhoek. Selecteer in het streamingmenu **iPhone**.




Telefoneren en FaceTimegesprekken



Als u bijvoorbeeld muziek streamt en er komt een telefoongesprek binnen, dan schakelt bij beantwoording de telefoon automatisch over naar het gesprek.


Na beëindiging van het gesprek gaat de muziek weer verder waar deze onderbroken werd.

Audiopad

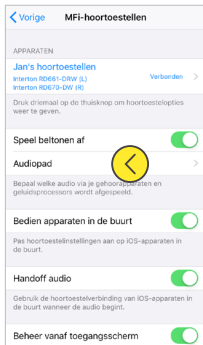

Met Audiopad bepaalt u de instellingen van verschillende audio-ingangen.

Ga naar **Instellingen**,
tik op **Algemeen**>
Toegankelijkheid>
MFi-hoortoestellen>
Audiopad.

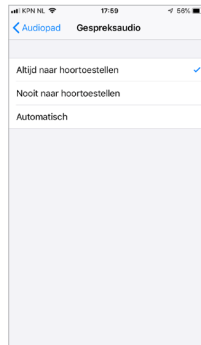

Selecteer een van de volgende opties:
Gespreksaudio (inkomende telefoongesprekken) of **Media-audio** (bijvoorbeeld muziek).

Kies hoe u het audiopad wilt instellen, bijvoorbeeld **altijd naar hoortoestellen**.

Bij **Automatisch** wordt er verbinding gemaakt met een bekabelde audiobron (mits aangesloten), anders zoekt en streamt hij naar standaard Bluetooth-apparaten (b.v. CarPlay, A2DP Bluetooth apparaten) of hoortoestellen.

Bediening van uw hoortoestellen via de native app in uw iPhone, iPad of iPod



Standaard volume- en programmabediening

Druk 3x op de Homeknop op uw Apple-apparaat om toegang te krijgen tot standaard volume- en programmabediening.

Zo kunt u bijvoorbeeld het volume van het linker- en rechterhoortoestel afzonderlijk bedienen.




Druk drie keer op de homeknop of veeg het Bedieningscentrum omhoog voor snelle toegang tot de hoortoestelbediening. Hoortoestelinstellingen die gerelateerd zijn aan uw iPhone, iPad of iPod wijzigt u via Instellingen> MFi-hoortoestellen.

Toegang tot eenvoudige bediening (naar boven vegen)

Veegt u met uw vinger naar boven over het scherm, dan komt u in het bedieningsscherm van uw Apple-apparaat. U kunt een snelkoppeling maken naar hoortoestelbediening via **Instellingen>Bedieningspaneel>Pas regelaars** aan. Scroll omlaag, zoek **Horen** en druk op de **+**. Hiermee voegt u een snelkoppeling naar hoortoestellen toe in het menu.



**Bedieningsmenu
(veeg omhoog)**
Snelkoppeling naar
hoortoestel.

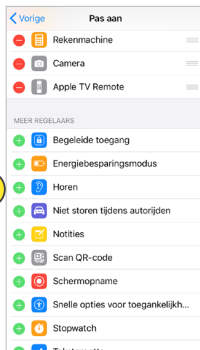


Pas regelaars aan

Nog meer instellingen van uw draadloze Interton hoortoestellen

U kunt ook toegang krijgen tot uw hoortoestellen via Instellingen.

Ga naar **Instellingen>Algemeen>Toegankelijkheid>MFi-hoortoestellen**.

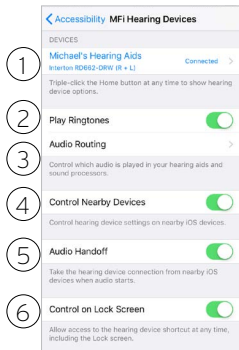

1. De naam, het model en de verbindingstatus van uw hoortoestellen.
2. Schakel de beltonen van uw iPhone in of uit in uw hoortoestellen.
3. Bepaal welke geluiden hoorbaar zijn in uw hoortoestellen.
4. + 5. Gebruik deze wanneer u uw hoortoestellen aan twee iOS-apparaten heeft gekoppeld. Hier kunt u de bediening regelen van uw hoortoestellen of het audiopad tussen iOS-apparaten.
6. Hiermee hebt u toegang tot uw hoortoestel als de iPhone/iPad is vergrendeld.

Slimme bediening en personalisatie met de Interton Sound app



Download en installeer de Interton app

Download de gratis Interton Sound app in de App Store of op Google Play op de volgende manier:

Als u een iPhone, iPad of iPod touch heeft:

1. Ga naar de App Store
2. Zoek naar 'Interton Sound'
3. Zoekt u op een iPad, verander dan de zoekcriteria in de linkerbovenhoek naar 'Alleen iPhone'
4. Tik op **Download** en vervolgens op **Installeer** om de app te installeren
5. Tik op de Interton Sound app op uw beginscherm om hem te starten.


Als u een Android-apparaat heeft:

1. Ga naar de Google Play Store
2. Zoek naar 'Interton Sound'
3. Tik op Installeren, dan Accepteren, zodat de app toegang krijgt tot bijvoorbeeld Bluetooth
4. Als de installatie is voltooid, tikt u op Open. Nu kunt u van start gaan met de Interton Sound app!



Hoortoestellen koppelen

De eerste keer dat u de app opent, dient u een aantal stappen te doorlopen om de hoortoestellen te verbinden. Accepteer eerst de Algemene voorwaarden en ga verder zoals hieronder vermeld. Het koppelingsproces is afhankelijk van het model hoortoestel.

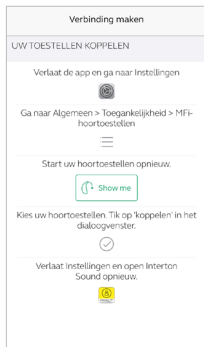

Als u een MFi-hoortoestel aan een Apple-apparaat koppelt:

Als u uw Apple-apparaat nog niet met uw MFi-hoortoestellen heeft gekoppeld, ga dan naar blz. 6 voor de koppelingsprocedure.



Als u een hoortoestel zonder MFi met uw Android of iOS-apparaat koppelt:
Uw apparaat met uw hoortoestellen koppelen:



Doe uw hoortoestellen uit Start ze opnieuw op (open en sluit de batterijlades)



Vergeet niet om push-meldingen en het gebruik van services op locatie toe te staan. Zo kunt u optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden die de app biedt.

Plaats de hoortoestellen dicht bij uw mobiele apparaat.

De Interton Sound app begeleidt u door de rest van de stappen:

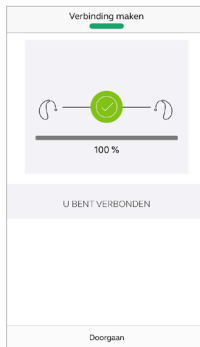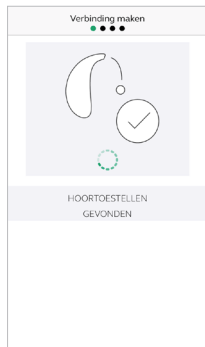


Als u de koppeling van de hoortoestellen via de iOS instellingen heeft gemaakt of niet-MFi toestellen heeft gekoppeld, bevestigt de app dat hij uw hoortoestellen gevonden heeft.

Met de volgende stap creëert u een beveiligde verbinding tussen de app en uw hoortoestellen. Dit doet u door uw hoortoestellen te herstarten. Als u een Android-apparaat heeft, doet u dat voor de tweede keer.

Wanneer u een groen vinkje ziet, kunt u aan de slag!

Overzicht Interton Sound app


De Interton Sound app heeft vier hoofdschermen die vanaf de onderkant van het navigatiemenu toegankelijk zijn.

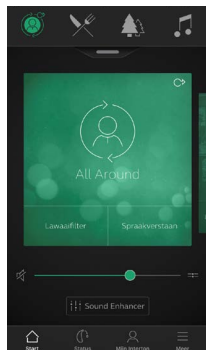

Start

Vanuit het startscherm kunt u alles bedienen. Vanaf hier wijzigt u eenvoudig het volume en de programma's.


Om terug te keren naar het startscherm klikt u op het plaatje met het huisje (Start) linksonder in het menu.

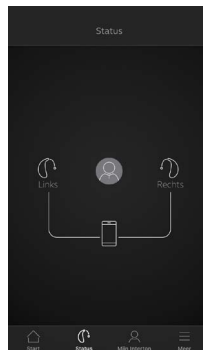

Status


Het scherm Status toont informatie over de verbinding tussen uw mobiele apparaat, hoortoestellen en Interton accessoires.

Waarschuwingen over lege batterijen worden hier ook getoond.

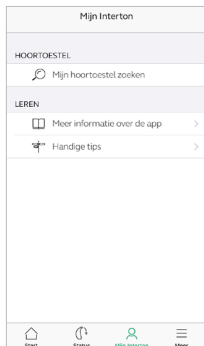

Mijn Interton

Mijn Interton Bevat handige tips voor het gebruik van de hoortoestellen en de app.

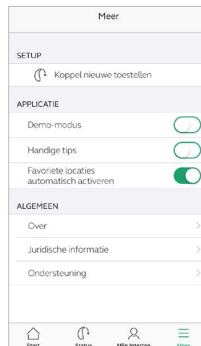


Meer

In het menu Meer vindt u algemene instellingen van de app, ondersteuning en juridische informatie.

Programma wijzigen

Via het Interton Sound app startscherm heeft u direct toegang tot de programma's en de Favorieten op drie eenvoudige manieren:

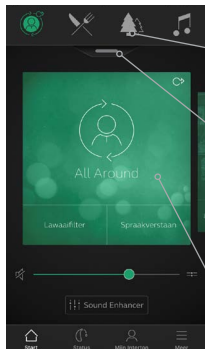

Bovenste menu


Veeg heen en weer voor alle programma's, met rechts Favorieten.

Programmaoverzicht

Veeg omlaag of tik onder het menu en zie alle programma's en Favorieten.

Snel vegen

Veeg over het groene deel op het scherm om van programma te wisselen. Dit toont ook per programma de beschikbare sneltoetsen.

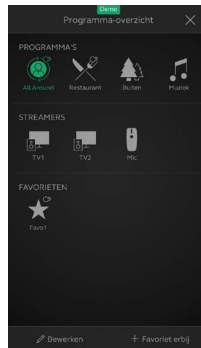


Programmaoverzicht

Als u het programma-overzicht opent ziet u al uw programma's en Favorieten. U kunt hier programma's wijzigen en bewerken en Favorieten toevoegen.



Volumeregeling hoortoestel

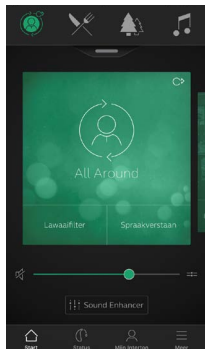


Volumeregeling hoortoestellen

Met de schuif past u het volume van uw hoortoestellen aan.

Dempen

Om het geluid van uw hoortoestellen te dempen, tikt u op Dempen (icoontje links van de volumeschuif).

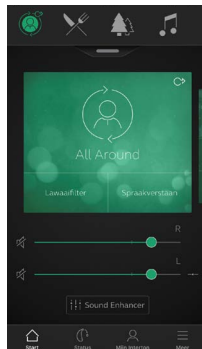


Volumeregeling per toestel

U kunt het volume van het linker- en rechterhoortoestel afzonderlijk regelen. Tik op het icoontje Splitsen, rechts van de volumeschuif. U ziet nu volumeschuiven voor elk hoortoestel apart.



Volumeregeling streamer

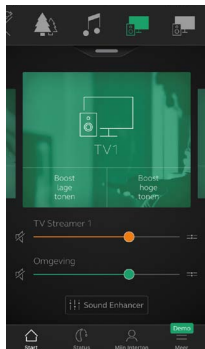

Volumeregeling streamer

Wanneer er een streamingprogramma is geselecteerd, kunt u het volume hiervan afzonderlijk aanpassen met de oranje schuif.

Volumeregeling hoortoestellen

U kunt het volume van de hoortoestellen nog steeds aanpassen, zonder dat dit invloed heeft op het volume van de audio die u streamt.



Volumeregeling van de streamer per oor

U kunt het volume van de streamer voor links en rechts afzonderlijk regelen. Tik op het icoontje Splitsen, rechts van de groene volumeschuif.




Kan ik al mijn apparaten op stil zetten?


Om het geluid van uw streamer of hoortoestellen te dempen tikt u op één van de demp-icoontjes, links van de volumeschuiven. Om de demping op te heffen, tikt u nog een keer op het demp-icoontje of op het vlak midden op het scherm.

Sneltoetsen

Elk programma heeft zijn eigen sneltoetsen. Dit zijn snelkoppelingen om geluidsaanpassingen te doen wanneer u ze nodig hebt.

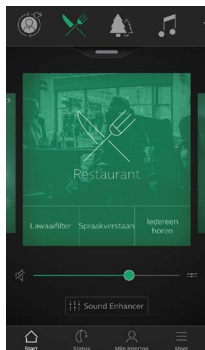

De sneltoetsen ziet u beneden in het groene programmagedeelte, onder de programmanaam.

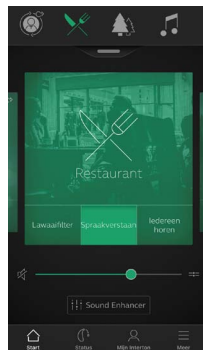


In het programma All-Around zijn Lawaaifilter en Sprakverstaan beschikbaar.

Tik op de sneltoetsen om ze te activeren en tik er opnieuw op om ze te deactiveren.


Sound Enhancer: Personaliseer uw geluid

Met Sound Enhancer stelt u de bas, de
midentonen en de hoge tonen af.

Sound Enhancer

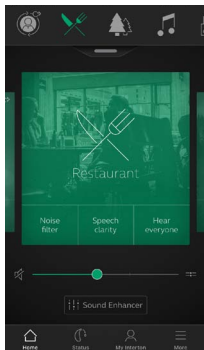

U krijgt toegang tot Sound Enhancer via de onderkant van het startscherm

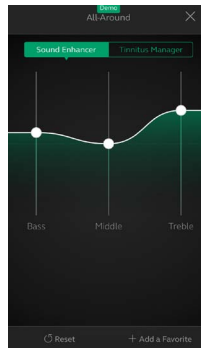

Bas/midden/hog
Verhoog of verlaag de bas, de middentonen en de hoge tonen.

Deze instellingen worden ook toegepast op het gestreamde geluid.




Kan ik mijn instellingen bewaren?

Sla de instellingen op in Favorieten als ze u bevallen. Slaat u ze niet op, dan blijven de aanpassingen ongewijzigd totdat u uw hoortoestellen herstart (openen en sluiten van de batterijlade).

Tinnitus Manager


De Tinnitus Manager is beschikbaar voor Interton Ready. De functies zijn beschikbaar in de app als de Tinnitus Sound Generator (TSG) in één of meer van de hoorprogramma's is ingeschakeld door uw hoorspecialist.

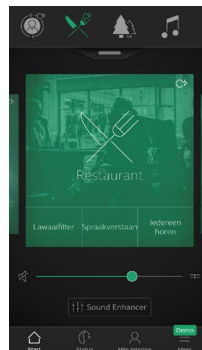

Er verschijnt een klein icoontje in de rechterbovenhoek bij Programma's als de TSG is geactiveerd. Als u naar de Sound Enhancer gaat in één van deze programma's, ziet u daar de Tinnitus Manager.



Mogelijkheden van de Tinnitus Manager in de app

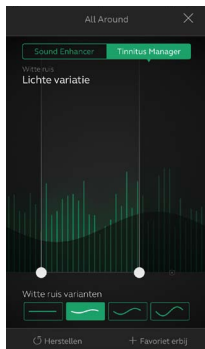

Als u een programma gebruikt met 'witte ruis'

Toonhoogte

Pas de toonhoogte van de witte ruis aan door de twee lijnen naar links en naar rechts te schuiven.

Geluidsvariatie

Pas de variatie van de witte ruis aan met één van de vier knoppen onderaan het scherm.


Tik op Herstellen om terug te keren naar de oorspronkelijke instellingen van uw hoorspecialist.



Kan ik mijn instellingen bewaren?

Sla de instellingen op in Favorieten als ze u bevallen. Slaat u ze niet op, dan blijven de aanpassingen ongewijzigd totdat u uw hoortoestellen herstart (openen en sluiten van de batterijlade).

🏠 Favorieten

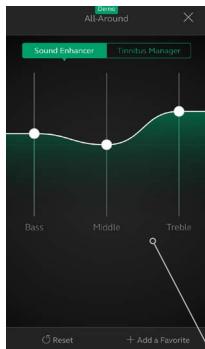


Favorieten toevoegen

U kunt uw gewenste geluidinstellingen opslaan als Favoriet.

Tik op Favoriet erbij in de onderste balk van de Sound Enhancer of via het programmaoverzicht.

De wijzigingen in de geluidinstellingen worden nu opgeslagen als een nieuwe Favoriet of als geüpdatete bestaande Favoriet.

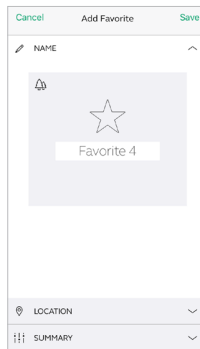


Naam

Geef uw Favoriet een naam.




Wat zijn de instellingen van mijn Favoriet?
Om de instellingen van uw Favoriet te zien tikt u op Overzicht onderaan het scherm. Dit kunt u doen als u de Favoriet toevoegt of als u in de modus Bewerken bent.

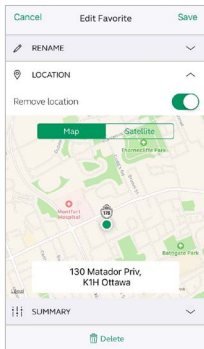

Locatie

U kunt ook een locatie aan uw Favoriet koppelen.

U kunt uw hoortoestellen dan automatisch laten overschakelen naar uw favoriete instellingen als u op die plek bent.

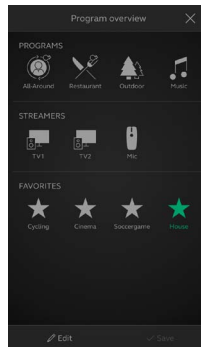

Overzicht favorieten

Als u uw nieuwe Favoriet heeft opgeslagen, wordt hij toegevoegd aan Overzicht favorieten



Bewerk of verwijder een actieve Favoriet door op Bewerken onderin het programmaoverzicht te tikken. Tik vervolgens

op de Favoriet. Wijzig de naam, locatie of tik op Verwijderen onderaan het scherm.

Wilt u alle Favorieten verwijderen, tik dan op Favorieten eruit onderaan het programma-overzicht, nadat u op Bewerken heeft getikt.

Status

Verbinding en batterijstatus

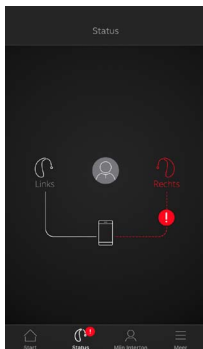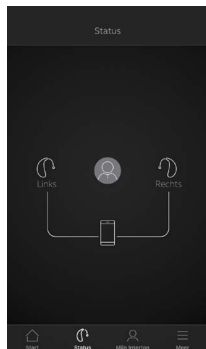


Verbindingsstatus

Toont de verbindingstatus tussen uw hoortoestellen, streamers en mobiele apparaat.

Ziet u een rode lijn met uitroeptekens, dan betekent het dat de verbinding is verbroken.


i Wat als ik geen verbinding meer heb?

Wanneer een verbinding is verbroken, drukt u op het uitroepteken om te zien hoe u deze kunt herstellen. Kijk ook of uw hoortoestellen wel aan staan, binnen het draadloos bereik zijn en of de batterijen nog vol genoeg zijn. Open en sluit de batterijlade als de verbinding zich niet herstelt.

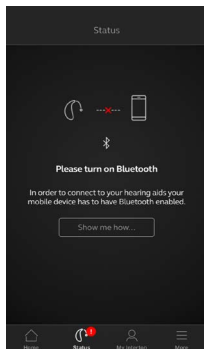

Bluetooth uit

Bluetooth moet altijd zijn ingeschakeld als u de app met uw hoortoestellen wilt gebruiken. Als Bluetooth uit staat, helpt de app u om het in te schakelen.

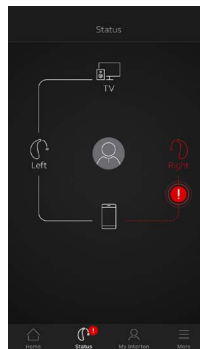

Batterijwaarschuwing

Als de batterij van één of beide hoortoestellen bijna leeg is, ziet u naast het hoortoestel een rood batterijtje.

Handige tips

De Interton Sound app geeft u tips voor een zo goed mogelijke hoorbeleving. Deze tips verschijnen automatisch op uw scherm tijdens de eerste weken dat u uw hoortoestellen draagt in combinatie met de app. U bepaalt zelf of u de Handige tips wilt ontvangen, de app zal het u vragen.



Ervaren hoortoestelgebruiker

Als u een ervaren hoortoestelgebruiker bent, ontvangt u alleen tips over het gebruik van de app.

Deze tips lichten verschillende functies van de app toe, die u nog niet hebt gebruikt.

Tik op Begrepen als u de tip heeft gelezen.
Tik op Geen tips weergegeven als u geen tips meer wilt krijgen.




Nieuwe hoortoestelgebruiker

Als u voor het eerst hoortoestellen draagt of als u meer wilt weten, zult u tips over de app gehoor.

Bij de algemene tips over horen krijgt u ook advies over hoe u het snelste aan uw hoortoestellen kunt wennen.


Leer meer over de app

Om nog meer te leren over de werking van de app, ga naar Meer informatie over de app in het menu van Mijn Interton. Verken de app en bekijk per onderdeel wat er allemaal mogelijk is.

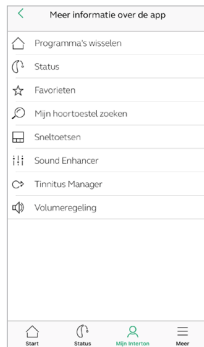

Overzicht

De volledige lijst met onderwerpen die u kunt raadplegen om meer over de app te leren.

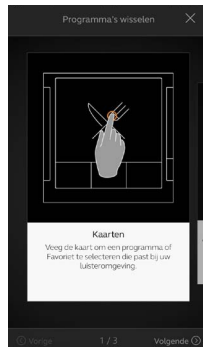


Voorbeeld:

Programma's wisselen

Leer hoe u van programma kunt wisselen door in het beginscherm naar links of rechts te vegen.

Mijn hoortoestel zoeken

Bent u uw hoortoestellen kwijt, ga dan naar Mijn Interton en tik op Mijn hoortoestel zoeken. De app kan u helpen ze te vinden.

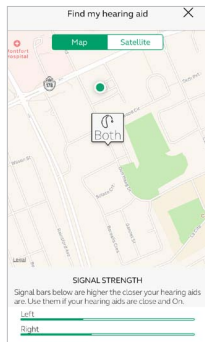

Laatst bekende locatie

Op de kaart ziet u waar uw hoortoestellen voor het laatst met de app verbonden waren. Tik op de hoortoestellen en bekijk op welk adres en hoe laat ze het laatst gezien zijn. U kunt wisselen tussen de kaart en satellietbeelden.

De app moet op de achtergrond actief zijn om deze functie te kunnen gebruiken.


In de buurt zoeken

Als de app en uw hoortoestellen bij elkaar in de buurt zijn, detecteert de app of u dichterbij komt of verder van uw hoortoestellen weg loopt. De rode balken onderaan het scherm geven aan hoe dichtbij ze zijn.

Uw hoortoestellen moeten zijn ingeschakeld om deze functie te gebruiken.


≡ Meer

Extra app-opties

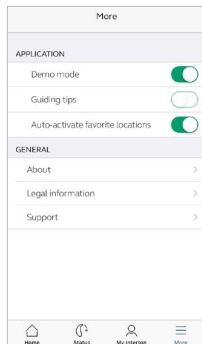

Applicatie: De app naar uw wens aanpassen

1. Demo-modus: bekijk de app zonder verbinding met uw hoortoestellen
2. Handige tips: zet ze aan of uit
3. Favoriete locaties automatisch activeren: bepaal of u uw Favorieten automatisch wilt laten starten op de aan hen gekoppelde locaties.

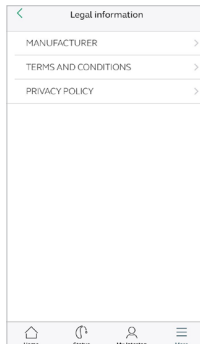

Juridische informatie

1. Informatie over wettelijke fabrikant, versienummer van de app etc.
2. Voorwaarden en bepalingen voor gebruik van de app
3. Privacybeleid

Algemene informatie

1. Over: Lees meer over de app en het merk Interton
2. Juridische informatie: zie volgende scherm
3. Ondersteuning: vind hier tips en links voor verdere ondersteuning

Stream geluid van uw Android-telefoon

Stream vanaf uw Android-telefoon naar uw Interton hoortoestellen met behulp van de Telefoonclip+.

Als uw hoortoestellen gekoppeld zijn met de Interton Telefoonclip+, kunt u geluid vanaf uw Android-telefoon naar uw hoortoestellen streamen.

Open hiervoor de mediaspeler op uw telefoon en druk op Play. Uw hoortoestellen schakelen over naar het streamingprogramma en na een paar seconden hoort u de audio.

Uw Interton Telefoonclip+ koppelen met uw Android-telefoon

- Ga naar de instellingen van uw telefoon en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
- Zet de Telefoonclip+ aan, verwijder het zilverkleurige kapje en zoek het blauwe Bluetooth-knopje.
- Druk op het knopje om de Bluetooth koppelmodus te activeren. De LED-indicator wordt
- blauw en de Telefoonclip+ staat 2 minuten lang in de koppelmodus.
- Na een paar seconden selecteert u op uw telefoon **Hearing Aid Phone** uit de lijst van Bluetooth-apparaten.
- Vul bij eventueel wachtwoord **0000** (vier nullen) in en kies **Headset**

Uw Interton Telefoonclip+ met uw hoortoestellen koppelen

- Open de batterijlades van uw hoortoestellen.
- Zet de Telefoonclip+ aan, verwijder het zilverkleurige kapje en zoek het witte koppelknopje.
- Druk op het knopje om de koppelmodus voor de hoortoestellen te activeren. De LED knippert elke twee seconden geel en de Telefoonclip+ staat 20 seconden lang in de koppelmodus.
- Sluit de batterijlades van uw hoortoestellen.

Voor meer informatie over de Interton Telefoonclip+ verwijzen we u naar de handleiding of naar de website [nl-NL/hoortoestellen/accessoires/telefoonclip+](https://nl-nl/hoortoestellen/accessoires/telefoonclip+)



Interton EasyHearing app



Met de Interton EasyHearing app hebt u de controle over uw hoortoestellen. In combinatie met de Telefoonclip+ kunt u met Interton EasyHearing app uw mobiele telefoon als afstandsbediening gebruiken. U ziet een eenvoudig overzicht van de functies en u kunt op afstand uw Interton draadloze hoortoestellen en Interton draadloze accessoires bedienen.

[Interton.com](https://www.interton.com)



Producent volgens EU-Richtlijn
Medische apparaten 93/42/EEC:

Interton

Postbus 85

6930 AB Westervoort

Nederland

+31 26 319 5000

interton.com

© 2019 GN Hearing GmbH. Alle rechten voorbehouden. Interton is een handelsmerk van GN Hearing GmbH. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Android, Google en Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. De Android robot wordt gereproduceerd of gewijzigd van werkzaamheden gemaakt en gedeeld door Google en gebruikt volgens de voorwaarden beschreven in de Commons 3.0 Attribution License. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.