



# Guía de usuario de la aplicación



[Interton.com](http://Interton.com)

# Introducción

**Las aplicaciones de Interton están diseñadas para mejorar su experiencia auditiva y permitirle obtener el máximo partido de sus audífonos Interton.**

La innovadora tecnología de sonido y el diseño de Interton se presentan en una gama completa de audífonos que convierten la audición en una experiencia más agradable. Los audífonos están disponibles exclusivamente a través de audiólogos y audioprotesistas.

La aplicación Interton le permite obtener el máximo de sus audífonos Interton al ofrecerle nuevas formas de control, personalización y alivio.

Para obtener más información y ayuda para las aplicaciones, visite el sitio web: **[www.interton.com](http://www.interton.com)**

Si desea una versión impresa de la guía de usuario de la aplicación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o simplemente imprima esta guía de usuario.



# Búsqueda e instalación de la aplicación



## Acceso a aplicaciones para iPhone, iPad e iPod touch: descargar desde App Store siguiendo estos pasos:

1. Entre en App Store tocando el icono de App Store  en un iPhone, iPad o iPod touch
2. En App Store, busque "Interton" y el nombre de la aplicación
3. Si utiliza un iPad, cambie los criterios de búsqueda en la esquina superior izquierda a "Solo iPhone"
4. Cuando encuentre la aplicación, toque "Obtener"
5. A continuación, toque "Instalar"
6. Introduzca un ID y una contraseña de Apple válidos
7. Después de introducir la contraseña, la aplicación Interton se descargará e instalará
8. Después de la descarga, puede encontrar la aplicación en la pantalla del dispositivo móvil: toque para abrir la aplicación Interton



## Acceso a aplicaciones para dispositivos Android: descargar de Google Play siguiendo estos pasos:

1. Para entrar en Google Play, toque el icono de Play Store  en el teléfono Android.
2. En Google Play, busque "Interton" y el nombre de la aplicación
3. Cuando encuentre la aplicación, toque "Instalar" y luego "Aceptar" para permitir que la aplicación acceda a ciertas funciones del teléfono, como Bluetooth
4. Después de introducir la contraseña, la aplicación Interton se descargará e instalará
5. Una vez finalizada la instalación, toque "Abrir" para abrir la aplicación Interton

# Aplicación Interton Sound



La aplicación Interton Sound ofrece una facilidad de uso sin precedentes con solo pulsar un botón. Controle y personalice la configuración de su audífono directamente desde su dispositivo móvil, de modo que pueda personalizar su experiencia auditiva para que se adapte a sus entornos sonoros.

La aplicación Interton Sound está disponible en App Store y Google Play.

## Para usar la aplicación, necesita los siguientes dispositivos:

### *Audífonos*

- Interton Ready o posterior.

### *Dispositivos móviles:*


- iPhone, iPad o iPod touch.
- Dispositivos Android compatibles.

Visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre compatibilidad y una lista actualizada de dispositivos móviles compatibles:

**[www.interton.com/compatibility](http://www.interton.com/compatibility)**




# Funciones de la aplicación Interton Sound

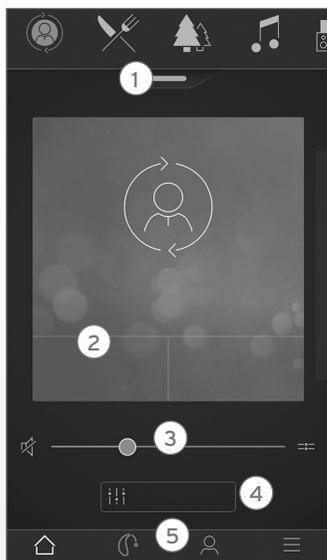


## Pantalla principal:

1. Utilice el carrusel superior, el **desplegable** o el lector de tarjetas para elegir su audífono o programa de transmisión, o su Favorito. Toque el menú desplegable para modificar programas y Favoritos.
2. Utilice los **botones rápidos** para realizar ajustes avanzados de sonido con un solo toque.
3. Ajuste del volumen o silenciar.
4. Acceda a Sound Enhancer (Potenciador de sonido) para ajustar los agudos/medios/graves. Acceda también a Tinnitus Manager para ajustar el tono y la variación del sonido del generador.
5. **Menú de navegación.**

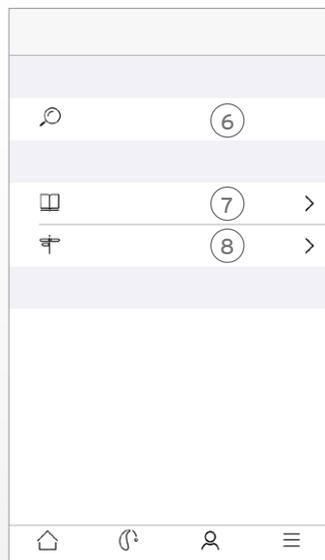

## Menú 'My' (Mi):

6. Encuentre su audífono perdido.
7. **Más información sobre la aplicación y sus funciones.**
8. **Sugerencias para el uso de la aplicación y los audífonos.**

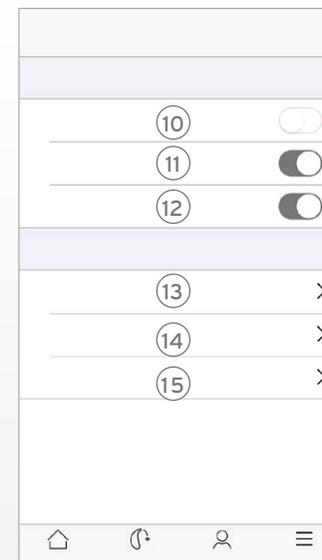

## Más menús:

10. Entrar/salir del modo Demo.
11. Activar/desactivar las sugerencias.
12. Activar/desactivar la activación automática de las ubicaciones favoritas.
13. **Sobre nosotros:** Más información sobre la aplicación y la marca.
14. **Información legal:** Conozca el fabricante, los términos y condiciones y la política de privacidad. Revisar, dar o retirar el consentimiento al tratamiento de datos.
15. **Asistencia** Más ayuda sobre aplicaciones y enlaces adicionales a ayuda basada en web y preguntas frecuentes.

## Uso previsto de aplicaciones para dispositivos móviles:

Las aplicaciones para teléfonos están destinadas a su utilización con audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos móviles para los que se han desarrollado las aplicaciones.



0297  
Interton A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca

Todas las cuestiones relacionadas con la Directiva 93/42/CEE de la UE sobre dispositivos médicos deben dirigirse a Interton A/S.

# Aplicación Interton EasyHearing



La aplicación Interton EasyHearing le proporciona el control de sus audífonos.

Junto con Phone Clip 2, Interton EasyHearing le permite utilizar su dispositivo móvil para obtener fácilmente una visión general y controlar de forma remota sus audífonos y accesorios inalámbricos Interton.

La aplicación EasyHearing está disponible en App Store y Google Play.

## Para usar la aplicación, necesita los siguientes dispositivos:

### Audífonos:

- Audífonos inalámbricos de Interton

### Accesorio inalámbrico:

- Interton Phone Clip 2.

### Dispositivos móviles:

- iPhone, iPad o iPod touch con iOS 7 o posterior.
- Dispositivos Android\* con Android OS 2.3.5 o posterior.


Para obtener el mejor rendimiento, la aplicación Interton EasyHearing no debe utilizarse activamente en más de un dispositivo móvil a la vez.

Para obtener más información, consulte [www.interton.com](http://www.interton.com)




\*Funcionalidad verificada en modelos seleccionados de HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung y Sony.

# Funciones de la aplicación Interton EasyHearing

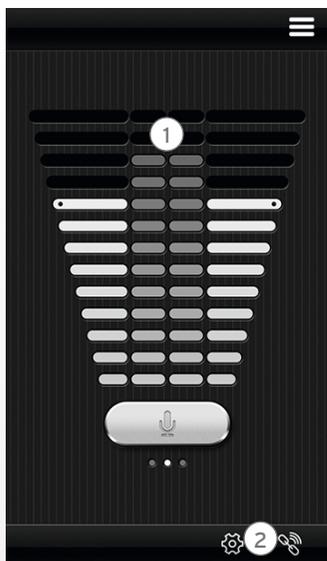

1. **Ajustar o silenciar** el nivel de volumen de sus audífonos inalámbricos. Ajustar o silenciar el nivel de volumen de sus accesorios inalámbricos.

2. Utilizar la pantalla **para ver** las conexiones entre la aplicación y los audífonos.

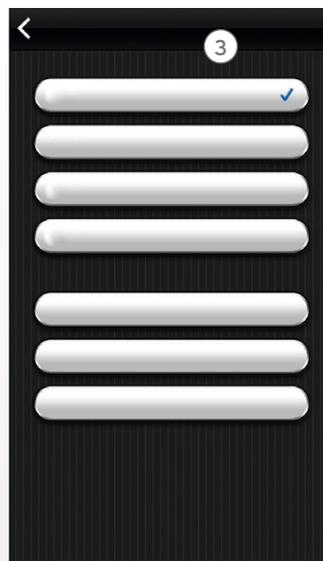

3. **Cambiar programas manuales y de transmisión.**

## Uso previsto de aplicaciones para dispositivos móviles:

Las aplicaciones para teléfonos están destinadas a su utilización con audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos móviles para los que se han desarrollado las aplicaciones.

CE

0297

Interton A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca

Todas las cuestiones relacionadas con la Directiva 93/42/CEE de la UE sobre dispositivos médicos deben dirigirse a Interton A/S.

# Precauciones y advertencias

## **Uso con aplicaciones para dispositivos móviles:**

Las notificaciones de actualizaciones de aplicaciones no deben desactivarse y se recomienda que el usuario instale todas las actualizaciones de la aplicación y del sistema operativo para garantizar la máxima protección contra las vulnerabilidades.

La aplicación solo debe utilizarse con los audífonos de Interton para los que está destinada. Interton no se hace responsable si la aplicación se utiliza con otros dispositivos o si se utilizan aplicaciones de terceros para controlar los dispositivos de Interton.

## **Precauciones y advertencias**

Si utiliza la aplicación Interton con el audífono, lea la guía de usuario del audífono. La guía de usuario del audífono se incluye en el paquete de los audífonos. Si necesita una copia nueva, consulte el servicio de atención al cliente de Interton.

Preste atención a la información marcada con el símbolo de advertencia



**ADVERTENCIA** indica una situación que podría dar lugar a lesiones graves,

**PRECAUCIÓN** indica una situación que podría dar lugar a lesiones leves y moderadas.





Fabricante según la Directiva  
93/42/CEE de la UE sobre  
dispositivos médicos:

**Fabricante**

Interton A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca  
Tfno.: +45 4575 1111  
interton.com

Nº CVR 55082715