

Gebruikershandleiding apps



Interton.com

Introductie

De Interton apps zijn in het leven geroepen om uw hoorbeleving te verbeteren en te zorgen dat u het maximale uit uw Interton hoortoestellen kunt halen.


De innovatieve geluidstechnologie en het ontwerp van Interton bieden een volledig reeks hoortoestellen voor een aangename hoorbeleving. De hoortoestellen zijn exclusief verkrijgbaar via audiologen en audiciens.

Met de Interton apps haalt u meer uit uw Interton hoortoestellen, dankzij nieuwe manieren om ze te bedienen en personaliseren.

Ga voor meer informatie en hulp bij de apps naar de website:

www.interton.com

Als u een gedrukt exemplaar van de gebruikershandleiding van de app wilt, kunt u contact opnemen met de klantenservice of deze handleiding afdrukken.

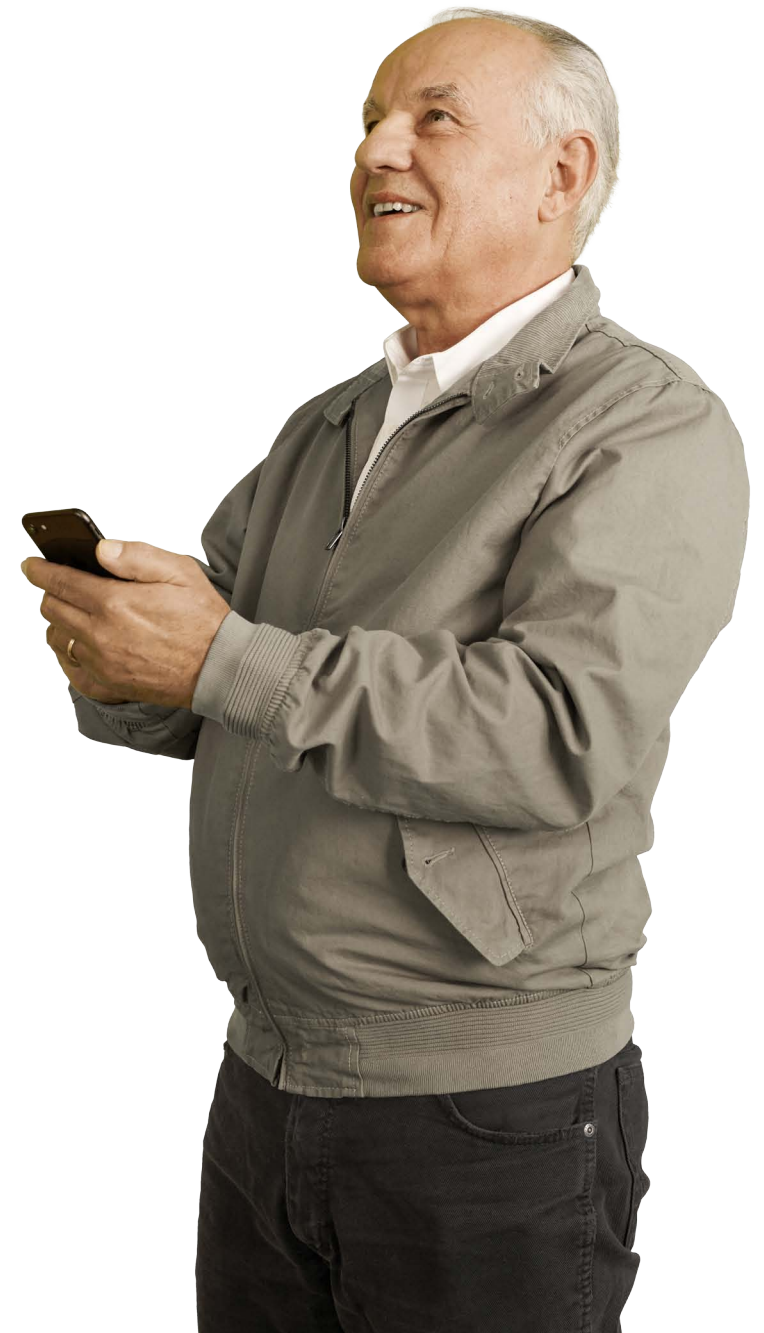

De app zoeken en installeren



Openen van apps voor iPhone, iPad en iPod touch - downloaden in de App Store via onderstaande stappen:

1. Open de App Store door op het pictogram  van de App Store te tikken op een iPhone, iPad of iPod touch
2. Zoek in de App Store naar 'Interton' en de naam van de app
3. Zoekt u op een iPad, verander dan de zoekcriteria in de linkerbovenhoek naar 'alleen iPhone'
4. Tik na het vinden van de app op 'Download'
5. Tik vervolgens op 'Installeren'
6. Voer een geldig Apple-ID en wachtwoord in
7. Nadat u het wachtwoord ingevoerd hebt, wordt de Interton app gedownload en geïnstalleerd
8. Na het downloaden vindt u de app op het scherm van uw mobiele telefoon. Tik erop om de Interton app te openen



Openen van apps voor Android-apparaten - downloaden in Google Play via de volgende stappen:

1. Open Google Play door op het pictogram  van Play Store te tikken op uw Android-telefoon.
2. Zoek in Google Play naar 'Interton' en de naam van de app
3. Hebt u de app gevonden, tik op Installeren, dan op Accepteren, zodat de app toegang krijgt tot functies zoals Bluetooth
4. Nadat u het wachtwoord ingevoerd hebt, wordt de Interton app gedownload en geïnstalleerd
5. Als de installatie is voltooid, tikt u op 'Openen' om de Interton app te openen.

Interton Sound app



De Interton Sound app biedt ongeëvenaarde gebruiksvriendelijkheid met slechts een tik van uw vinger. Bedien en verpersoonlijk de instellingen van uw hoortoestel direct vanaf uw mobiele telefoon, zodat u uw geluidsbeleving kunt aanpassen op uw geluidsomgevingen.

De Interton Sound app is verkrijgbaar in de App Store en op Google Play.

Om de app te kunnen gebruiken, hebt u de volgende apparaten nodig:

Hoortoestellen:

- Interton Ready of nieuwere versie.

Mobiele apparaten:


- iPhone, iPad of iPod touch.
- Geschikte Android-apparaten.

Bezoek onze website voor meer informatie over compatibiliteit en een bijgewerkte lijst met compatibele mobiele apparaten:

www.interton.com/compatibility




Functionaliteit Interton Sound app

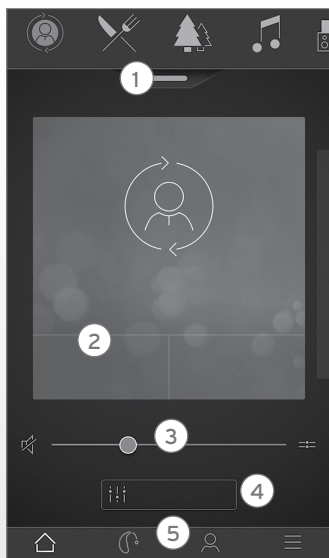


Hoofdscherm:

1. Gebruik de bovenste iconen-carrousel, het **dropdown programma-overzicht** of swipe de grote afbeeldingen om een hoortoestel- of streamerprogramma of uw favoriet te kiezen. In het programma-overzicht kunt u programma's en favorieten bewerken.
2. Bedien de **sneltoetsen** voor geavanceerde geluidsinstellingen met één tik.
3. Pas het **volume** aan of demp het geluid.
4. Open **Sound Enhancer** om hoge/midden/lage tonen aan te passen. Open hier ook de Tinnitus Manager om de toonhoogte en geluidsvariatie van de Tinnitus Sound Generator aan te passen.
5. **Navigatiemenu.**

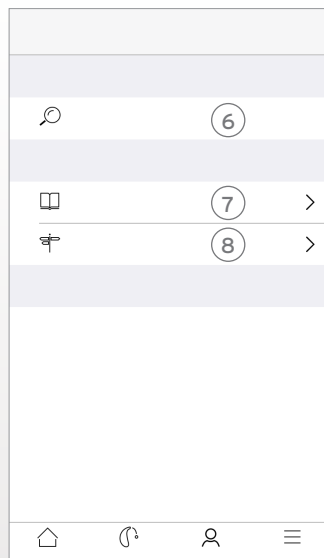

Menu 'Mijn' :

6. Uw **verloren hoortoestel** zoeken
7. **Meer leren over de app** en zijn functies.
8. **Handige tips** voor het gebruik van de app en de hoortoestellen.

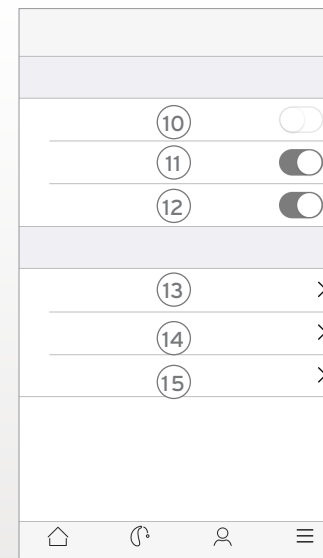

Menu 'Meer'

10. **Demomodus** openen/sluiten.
11. **Handige tips** inschakelen/uitschakelen
12. **Automatisch activeren van favoriete locaties inschakelen/uitschakelen**
13. **Over:** Lees meer over de app en het merk.
14. **Juridische informatie:** Informatie over de fabrikant, algemene voorwaarden en het privacybeleid. Bekijk en geef toestemming tot gegevensverwerking of trek deze in.
15. **Ondersteuning:** Meer hulp met de app en aanvullende koppelingen naar hulp op internet en veelgestelde vragen.

Gebruiksbestemming van apps op mobiele apparaten:

Apps op mobiele apparaten zijn bedoeld om te worden gebruikt voor draadloze hoortoestellen. Apps op mobiele apparaten verzenden en ontvangen signalen van de draadloze hoortoestellen via mobiele apparaten waarvoor de apps ontwikkeld zijn.



0297

Interton
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland

Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG dienen te worden gericht aan Interton A/S

Interton EasyHearing app



Met de Interton EasyHearing app hebt u de controle over uw hoortoestellen. In combinatie met de Telefoonclip+ kunt u met Interton EasyHearing app uw mobiele telefoon als afstandsbediening gebruiken. U ziet een eenvoudig overzicht van de functies en u kunt op afstand uw Interton draadloze hoortoestellen en Interton draadloze accessoires bedienen.

De Interton EasyHearing app is verkrijgbaar in de App Store en op Google Play.

Om de app te kunnen gebruiken, hebt u de volgende apparaten nodig:

Hoortoestellen:

- Interton draadloze hoortoestellen.

Draadloze accessoires:

- Interton Telefoonclip+.

Mobiele apparaten:


- iPhone, iPod of iPod touch, draaiend op iOS 7 of hoger.
- Android toestellen draaiend op Android OS 2.3.5 of hoger.

Voor de beste prestaties mag de Interton EasyHearing app niet actief gebruikt worden op meer dan één mobiel apparaat tegelijkertijd.

Zie voor meer informatie **www.interton.com**




Functionaliteit Interton Easyhearing app

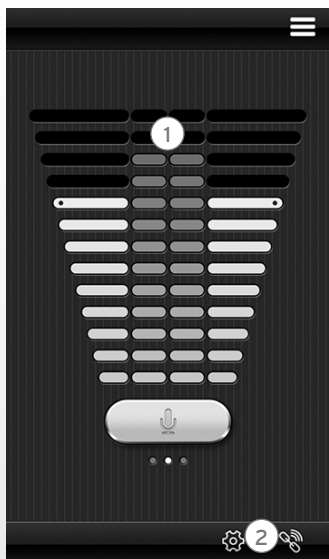

1. **Pas het volume** van uw draadloze hoortoestellen aan of demp het. Stel het volume van uw draadloze accessoires aan of demp het.

2. Gebruik het speciale **'Status' scherm** voor een overzicht van de verbindingen tussen de app en uw hoortoestellen.

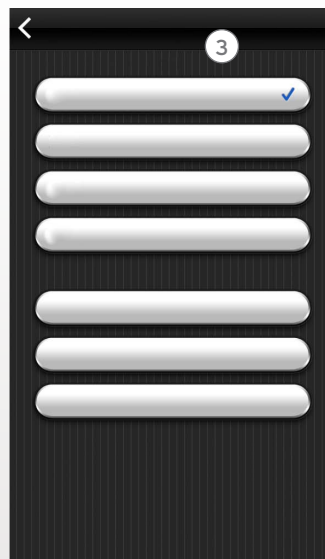

3. **Wijzig handmatige- en streamingprogramma's.**

Gebruiksbestemming van apps op mobiele apparaten:

Apps op mobiele apparaten zijn bedoeld om te worden gebruikt voor draadloze hoortoestellen. Apps op mobiele apparaten verzenden en ontvangen signalen van de draadloze hoortoestellen via mobiele apparaten waarvoor de apps ontwikkeld zijn.



Interton
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland

Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG dienen te worden gericht aan Interton A/S

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Gebruik met apps voor mobiele apparaten:

Meldingen van app updates mogen niet worden uitgeschakeld en het is aan te raden dat de gebruiker alle updates voor de app en het besturingssysteem installeert om te zorgen voor de best mogelijke bescherming tegen kwetsbaarheden.

De app mag alleen gebruikt worden voor de Interton toestellen waarvoor hij bedoeld is. Interton aanvaardt geen aansprakelijkheid als de app gebruikt wordt met andere apparaten of als apps van derde partijen gebruikt worden om de hoortoestellen van Interton te bedienen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Als u de Interton app gebruikt in combinatie met het hoortoestel, zorg dan dat u de gebruikershandleiding van het hoortoestel gelezen hebt. De gebruikershandleiding bij het hoortoestel is geleverd bij het pakket met het hoortoestel. Als u een nieuw exemplaar nodig hebt, neemt u dan contact op met de klantenservice van Interton.

Let op informatie die gemarkeerd is met een waarschuwingssymbool

 **WAARSCHUWING** duidt op een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen.
LET OP wijst op een situatie die kan leiden tot lichte verwondingen.





Producent volgens
EU-Richtlijn Medische
apparaten 93/42/EEC:

Interton

Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland
+31 26 319 5000
interton.com